

Leukotape® K

Conforto e alívio contínuos



**Bandagem Elástica
Funcional**
Efeito analgésico,
circulatório e
neuromecânico




BSNmedical

Leukotape® K é uma bandagem elástica funcional que melhora a função muscular sem limitar os movimentos.

Sua principal ação é a promoção de estímulos sensoriais e mecânicos na pele, facilitando o fluxo sanguíneo e linfático, liberando a pressão para, assim, aliviar a dor e melhorar a função muscular.

Possui efeito analgésico, circulatório e neuromecânico.

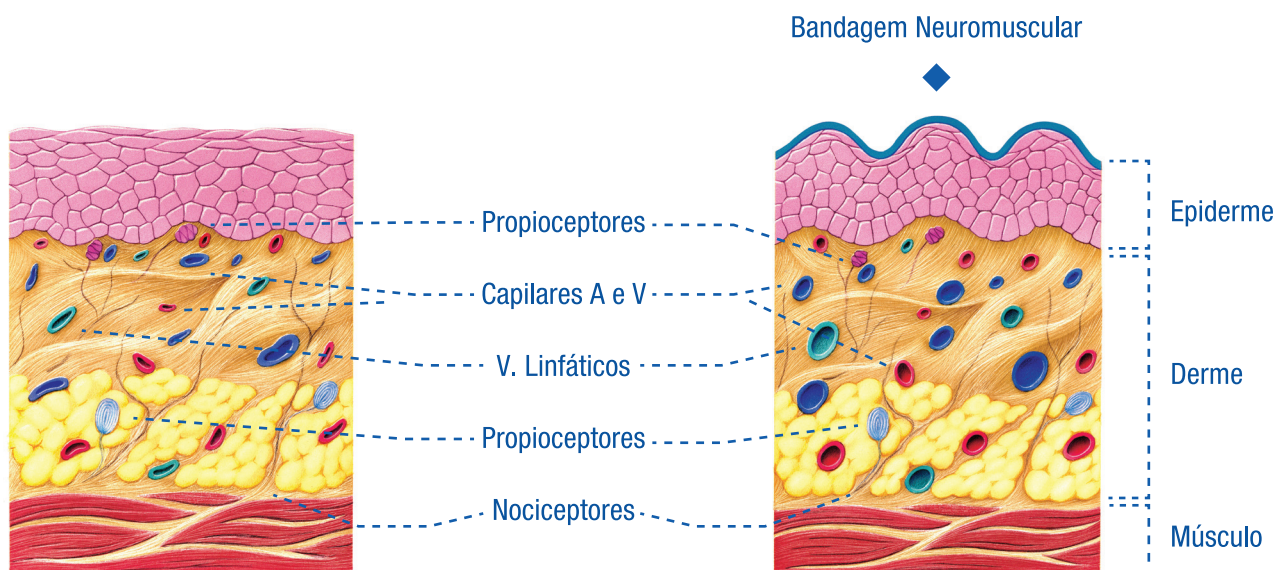

Leukotape® K

✓ Adere de forma confiável

Adesivo de Poliacrilato

✓ Apoio ao efeito terapêutico

Padrão ondulatório da camada adesiva

✓ Firme e agradável para a pele

Substrato de algodão

✓ Permite um melhor controle do estiramento

Papel laminado

✓ Adapta-se perfeitamente às características elásticas da pele

Estica-se longitudinalmente



O que torna Leukotape® K tão especial?

Bandagem de alta qualidade

Material de suporte de algodão que minimiza o risco de alergias.

Adesivo com padrão em forma de onda

Cria espaços que permitem que o ar e a umidade passem através da fita, evitando descolamento.

Características elásticas similares às da pele

Espessura, peso e capacidade de estiramento.

Resistente à água

Permite o uso em atividades aquáticas e não restringe a higiene pessoal.

Adesivo acrílico e 100% isento de látex

Faz de Leukotape® K uma bandagem hipoalergênica.



Leukotape® K

- ◆ ◆ **Vermelha e rosa:** Absorve mais luz, o que permite aumentar a temperatura no local. É indicada para lesões musculares subagudas ou crônicas.
- ◆ ◆ **Azul:** Reflete mais luz e, portanto, é utilizada para diminuir a temperatura no local afetado. Ideal para lesões agudas e lesões que se relacionem com inflamação (distensões, tendinite e aplicações linfáticas). Tem um efeito relaxante.
- ◆ ◆ **Cor de pele ou bege:** Por ser uma cor neutra, é utilizada quando não se quer influir em alguma cor já colocada. Usada principalmente em bebês.
- ◆ ◆ **Preta:** Começou a ser utilizada devido à grande demanda estética. Atualmente é a mais usada e atua como apoio às outras cores.



Informações para pedidos

Leukotape® K

Código de produto	Tamanho	Cor
B72978-11	5 cm x 5 m	Cor da Pele
B72978-16	5 cm x 5 m	Vermelha
B72978-21	5 cm x 5 m	Azul
B72978-23	5 cm x 5 m	Preta
B72978-24	5 cm x 5 m	Turquesa
B72978-25	5 cm x 5 m	Rosa



Neve Indústria e Comércio de Produtos Cirúrgicos Ltda
R. Julio Parigot, 525/535 Vila Antonieta, São Paulo-SP, CEP 03478-007
SAC Neve: 0800 70 45415 sac@neveline.com.br Telefone Comercial: 11 2141 8100

www.neveline.com.br www.bsnmedical.com