


FICHA TÉCNICA

NOME COMERCIAL

ADAPTIC® Malha Não Aderente

REFERÊNCIA DO FABRICANTE E APRESENTAÇÃO

2012 ADAPTIC® 7,5x7,5 cm	C/50 Unids.
2013 ADAPTIC® 7,5x20 cm	C/36 (3) Unids.
2014 ADAPTIC® 7,5x40 cm	C/36 Unids.
2015 ADAPTIC® 7,5x20 cm	C/24 Unids.
2018 ADAPTIC® Rolo 7,6x152	C/10 Rolos

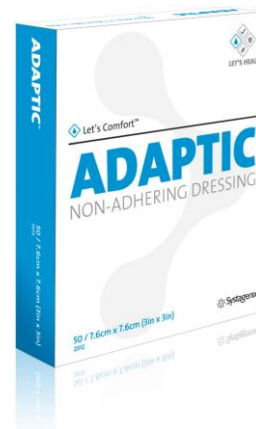

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A) Descrição

ADAPTIC® é uma compressa primária não-aderente de acetato de celulose levemente impregnada com uma emulsão a base de petrolato. Previne a aderência ao leito da ferida, protegendo o tecido de granulação. A compressa tem boa elasticidade, permitindo uma remoção sem causar trauma nem dor.

ADAPTIC® previne a retenção de fluidos no leito da ferida, reduzindo a maceração: o exsudado passa livremente através da malha para o curativo secundário absorvente.

ADAPTIC® pode ser cortado, não se desfiando, nem deixando partículas na ferida.

B) Composição

ADAPTIC® é uma compressa estéril não aderente formada por uma malha de acetato de celulose – não se desfiando nem deixando filamentos quando em contato com a ferida. ADAPTIC® está levemente impregnado com uma emulsão especial de petrolato líquido, uma vaselina purificada, de forma a transmitir à ferida a umidade necessária para que a fase de epitelização decorra em boas condições. É uma compressa não aderente com uma porosidade quadrada muito regular, com 1 mm de lado. Esta fórmula única faz do ADAPTIC® uma cobertura fácil de manusear e com elevada porosidade.

ADAPTIC® é uma compressa utilizada em feridas superficiais, cujos tecidos cicatrizam normalmente por epitelização. O tratamento aconselhado neste tipo de situações é manter umedecido o ambiente da ferida e proteger as células recém-formadas. ADAPTIC® aplica-se diretamente sobre a ferida para:

- Impedir a maceração das feridas exsudativas, suturas ou áreas de abrasão.
- Evitar a aderência da cobertura secundária, permitindo uma rápida passagem dos fluxos para o curativo absorvente.

C) Indicações

A compressa ADAPTIC® é indicada para ser utilizada em feridas, desde secas a altamente exsudativas, tais como:

- Queimaduras de 1º e 2º graus
- Abrasões
- Enxertos
- Úlceras venosas
- Úlceras de pressão
- Eczema
- Incisões cirúrgicas
- Lacerações
- Procedimentos reconstrutivos
- Linhas de sutura

D) Instruções de uso

Aplicação

1. Limpar a ferida de acordo com o protocolo de tratamento de feridas.
2. Corte a compressa ADAPTIC® à medida, se tal for necessário, e coloque-a diretamente sobre a ferida.
3. Cobrir com um curativo secundário adequado

Mudança de curativo e remoção

1. ADAPTIC® remove-se completamente de uma só vez.
2. Pode permanecer vários dias na ferida, dependendo da quantidade de exsudado.

EMBALAGEM

Embalagem unitária estéril, que contém as seguintes informações:

- Denominação do produto
- Método de esterilização utilizado
- Data de validade
- Número de lote

CONSERVAÇÃO

Entre 0º e 25º

MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO

Esterilização por radiação

GARANTIA DE QUALIDADE

Marca CE 0086