

HYDROSORB



Descrição

Curativo composto por hidrogel transparente e absorvente com uma camada de poliuretano permeável ao vapor e a umidade e impermeável à água e bactérias. Indicado para feridas de diversas etiologias não infectadas na fase de granulação e epiteliação, e também para amolecer e hidratar o tecido desvitalizado.

Composição

Gel de poliuretano absorvente, revestido com uma cobertura de poliuretano semipermeável.

Mecanismo de ação

Hydrosorb não só oferece umidade como também absorve as secreções. Deste modo, cria um ambiente úmido que estimula a cicatrização da ferida. Hydrosorb é transparente, permitindo uma avaliação visual sem remover a cobertura, é indolor na remoção e não deixa resíduos na lesão.

Indicação

É indicado para todas as feridas superficiais na fase de granulação e epiteliação, e também para amolecer e hidratar tecido necrosado. Pode ser usado em abrasões, queimaduras de segundo grau, radiodermite, úlceras venosas e enxertos cutâneos.

Instruções de uso

Escolher o tamanho do curativo de forma que exceda as bordas da ferida cerca de 1 a 2 cm. Retire a película de proteção azul que se encontra na parte de trás. Aplique o Hydrosorb sobre o leito da ferida e utilize uma cobertura para fixação.

Tempo de troca

Quando saturado ou por até 7 dias.

Contra Indicação

Não deverá ser utilizado em pacientes com hipersensibilidade a um dos seus componentes.

Não utilizar em feridas clinicamente infectadas ou queimaduras de terceiro grau.

Armazenagem e transporte

Armazenar em local seco e com uma temperatura inferior a 40°C e ao abrigo da luz solar direta.

Produto estéril até que seja aberto, não utilizar caso a embalagem esteja violada.

Não reesterilizar.

O transporte deve ser feito em veículo limpo, seco e livre de odores.

CÓDIGO	TAMANHO DO CURATIVO	QUANTIDADE POR CAIXA
900854	10 x 10 cm	5
900855	20 x 20 cm	3

Esterilização: Radiação

Validade: 3 anos

Fabricante: Paul Hartmann AG - Alemanha

Registro Anvisa: 80170310002

Farm. Resp.: Roseli Witzke Furstenau CRF - SP 10.308

HARTMANN

Rua Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 690 – 1º Andar

CEP 06460-040 – Tamboré – Barueri – SP

Telefone: (11) 3168-0226

comercial@hartmannbr.info – hartmann.info/pt-BR

